



Istruzione Operativa di Unità Operativa	IU 301565 51 Rev. 1 del 12/04/2023 Pagina 1 di 1
DAI di PATOLOGIA e DIAGNOSTICA UOC di MICROBIOLOGIA	
RACCOLTA e CONSERVAZIONE MATERIALI PURULENTI	

ITER EMISSIONE	E. O.	RUOLO	NOME COGNOME	FIRMA
REDAZIONE*	UOC Microbiologia e Virologia	Dirigente medico	Annarita Mazzariol	<i>Annarita Mazzariol</i>
REDAZIONE*	UOC Microbiologia e Virologia	TSLB	Nicoletta Melloni	<i>Nicoletta Melloni</i>
VERIFICA*	UOC Microbiologia e Virologia	Referente Qualità	Sonia Tozzi	<i>Sonia Tozzi</i>
APPROVAZIONE*	UOC Microbiologia e Virologia	Direttore	Davide Gibellini	<i>Davide Gibellini</i>
DATI GESTIONE DOCUMENTO				
NOME FILE	IU 301565 51			
DATA PRIMA APPLICAZIONE	20/04/2012			
DISTRIBUZIONE	Controllata X			

La presente Istruzione Operativa fornisce le indicazioni relative alle modalità di conservazione dei materiali purulenti, liquidi, biopsie, protesi durante l'orario di chiusura dell' U.O.C. di Microbiologia e Virologia.

Raccogliere possibilmente il campione prima di iniziare la terapia antibiotica

TAMPONI COPAN tappo rosa / MATERIALE PURULENTO

Conservare a temperatura ambiente fino all'invio nell'UOC

BIOPSIA / PROTESI / MEZZI DI SINTESI / DISPOSITIVI MEDICI

- entro 30 minuti dal prelievo inviare in un contenitore sterile (es. barattolo tappo giallo) mantenendo il campione umido con alcune gocce di soluzione fisiologica
- in orario di chiusura dell'UOC:
 - Il campione dovrebbe essere ricoperto di brodo tioglicolato
 - Immettere sterilmente il brodo nella provetta/barattolo contenente il campione: la quantità varia a seconda delle dimensioni del frammento che deve essere appena coperto dal brodo.
- conservare i flaconi a temperatura ambiente fino all'invio all'UOC.

LIQUIDI BIOLOGICI

- Aspirare i campioni con siringa e trasferire in provetta sterile entro 30 minuti.

Se impossibile inviare il campione in UOC microbiologia nell'arco di max 48 ore è consigliabile inoculare direttamente in bottiglia per emocolture

- suddividere il campione nel flacone aerobio e anaerobio, inoculare indicativamente 2,5 mL in igi flacone - nel caso di materiale scarso privilegiare bottiglia anaerobia,
- conservare i flaconi a temperatura ambiente fino all'invio all'UOC.

In caso di necessità il brodo Tioglicolato si può trovare presso i Centri Trasfusionali delle 2 sedi (BT/BR).